



РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

## 3D РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА CS Medica CS-302 BodyLift



**Благодарим Вас за приобретение 3D роликового массажера для тела CS Medica CS-302 BodyLift.**



Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем. Гарантийный талон находится в середине настоящего руководства по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

**\*\*\* ПРИБОР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ \*\*\***

### 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Перед использованием прибора внимательно прочитайте данный раздел.



#### Предупреждение:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезным травмам.

- Используйте прибор только по прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Данный прибор не предназначен для самостоятельного использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они не будут обучены и проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.
- Не оставляйте прибор без присмотра, особенно если рядом находятся дети.
- Перед каждым использованием необходимо убедиться, что прибор и его компоненты не повреждены. В случае обнаружения неисправностей или повреждений не пользуйтесь прибором и обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания продукции CS Medica, адрес которого указан в настоящем руководстве.

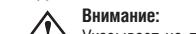


#### Внимание:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.

- Перед началом эксплуатации прибора обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте массажер на участках с тонкой кожей: пальцы, проекция щитовидной железы, ахиллово сухожилие и т. д.
- Неправильное применение массажера может привести к травмированию кожи, поскольку прибор предназначен для захвата кожной складки.
- Если Вы чувствуете сильную боль или получаете неприятные ощущения во время использования, прервитесь и обратитесь к врачу.
- Не используйте массажер, если у Вас имеется аллергия на металлы. Это может привести к нежелательным реакциям на коже и проблемам со здоровьем.
- Не используйте прибор во время беременности, при болезнях сердца, гипертонии, диабете или повреждениях кожи.

- Не используйте прибор на животных и на детях младше 15 лет.
- Запрещается самостоятельный ремонт прибора.
- Не проводите массаж по сухой коже, обязательно используйте антицеллюлитные средства, лосьоны для тела, бальзамы, кремы и масла.

### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

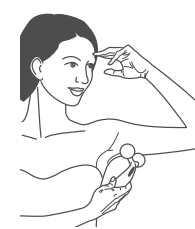

3D роликовый массажер представляет собой компактный прибор Y-образной формы. Расположенные под углом 75° два больших сферических массажных ролика с платиновым напылением плавно вращаются на 360° и оказывают деликатное массажное воздействие без трения и давления.

Прибор предназначен для проведения интенсивного массажа всего тела: помогает преодолеть усталость, напряжение, стресс, способен усилить кровообращение в отдельных зонах, оказывая воздействие на проблемные участки кожи и мышц, поможет смоделировать контуры тела и сделать кожу более упругой и подтянутой. При прокатывании массажера по телу оказывается воздействие, сравнимое с техникой ручного массажа, при котором выполняются приемы пощипывания, поглаживания, захватывания, благодаря чему достигается положительный эффект.

Массажер может быть использован совместно с различными уходовыми косметическими средствами, антицеллюлитными кремами, маслами и бальзамами, способствуя лучшему впитыванию активных компонентов и усилению их эффективности.

3D роликовый массажер для тела CS Medica CS-302 BodyLift поможет снять усталость и напряжение в мышцах, улучшить кровообращение и активизировать обменные процессы в организме, устранить отечность и уменьшить проявление целлюлита, а также повысить тонус и эластичность кожи.

### 3. ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

#### • Моделирующий 3D-массаж всего тела

Универсальная Y-образная форма массажера позволяет использовать его для проведения щипкового моделирующего, лифтингового и антицеллюлитного массажа различных зон Вашего тела.

### • Четкие и подтянутые контуры тела

Повседневное применение прибора поможет скорректировать контуры тела, придать большую подвижность и эластичность мышцам, уменьшить проявление целлюлита и сделать кожу более гладкой и упругой.

#### • Улучшение впитывания кремов и сывороток


Массажное воздействие ускоряет процесс проникновения активных компонентов уходовой косметики, способствует ускорению восстановления, нормализации внутриклеточных процессов.

#### • Вращение массажных роликов на 360°

Мультигранная фактура массажных роликов обеспечивает плавный ход по массажным линиям, вращаясь на 360°, ролики хорошо захватывают кожную складку по принципу ручного массажа. Обеспечивается моделирующий и лимфодренажный массажный эффект, что способствует активному стимулированию кровообращения и ускорению процессов.

### 4. ОПИСАНИЕ

Ниже приведены основные части и комплектующие 3D роликового массажера для тела CS Medica CS-302 BodyLift.

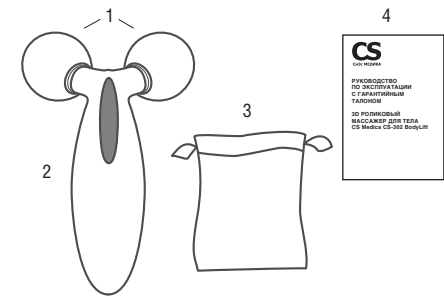

- Моделирующие лифтинг-сферы Maxi
- Рукоятка прибора
- Чехол для хранения и переноски
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

### 5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**Примечание:** перед применением продезинфицируйте ролики массажера хлоргексидином и протестируйте его на небольшом участке тела, чтобы убедиться в отсутствии негативных реакций. Если во время или после проведения массажа возникает покраснение или другие нежелательные реакции на коже, прекратите использование и обратитесь к дерматологу.



Перед использованием массажера тщательно очистите кожу, используя специальные средства (скрабы, пилинги и др.).



Подготовьте выбранные средства по уходу, например крем, масло или сыворотку, и нанесите небольшое количество на участок воздействия.


Начинайте использование массажера в течение непродолжительного времени (4–5 минут) исключительно по направлению массажных линий, постепенно увеличивая продолжительность массажа.

Общая продолжительность использования массажера не должна превышать 15 минут. Рекомендуется делать массаж курсами 10–14 дней ежедневно или 1–3 раза в неделю. Для усиления противоотечного эффекта рекомендуется использовать массажер охлажденным (криомассаж). Перед применением поместите его в общий отсек холодильника на боковую полку на дверце (запрещено помещать прибор в морозильную камеру). После использования массажер необходимо промыть водой и протереть полотенцем насухо.

### 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


#### 6.1. Обращение с прибором

Пользоваться 3D роликовым массажером достаточно просто, допустимы два способа проведения по массажным линиям:

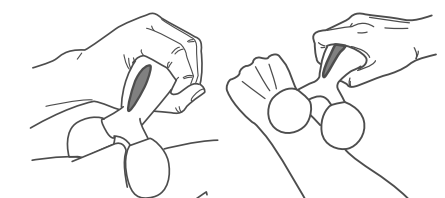


С захватом кожи, когда она попадает между сферами

Растирание линий для легкого эффекта лифтинга

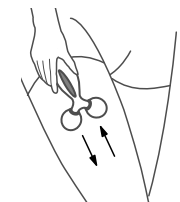

Проводя прибором по массажным линиям, оказывайте легкое давление на массажер. Пройдитесь по каждой зоне 5–10 раз. Обязательно начинайте с нижней части и постепенно продвигайтесь вверх. Не рекомендуется хаотичным образом проводить массажером туда и

обратно: все движения должны быть четкими, от периферии к центру, именно таким способом удастся достичь лимфодренажного эффекта. Для дости-

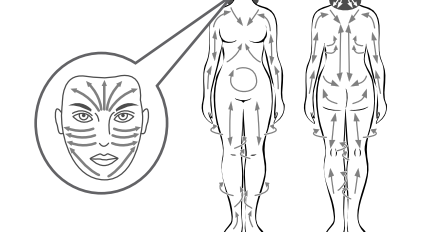

жения лифтингового эффекта прокатывайте роллер только в одну сторону и никогда не совершайте сильные движения вперед-назад, которые растягивают эпидермис. Не следует чрезмерно давить на прибор или увеличивать количество повторений по каждой массажной линии – указанного числа движений будет вполне достаточно для достижения нужного эффекта.

#### 6.2. Рекомендации по использованию

##### ТЕЛО

#### Похудение бедер

Заднюю поверхность бедра начинайте массировать в направлении от коленей к ягодицам. Повторяйте несколько раз, чтобы ноги становились стройнее.

#### Шейно-воротниковая зона





Начинайте прокатывание массажера от головы в сторону плеча по линии шеи. Совершайте интенсивные движения, чтобы быстро снять напряжение.

#### Подключичная область

Прокатывайте ролики между ключицей и верхней частью груди, чтобы расслабить большую и малую грудные мышцы.

#### Массаж рук

Прокатывайте массажные ролики по внутренней поверхности предплечья, от запястий к локтевому суставу.

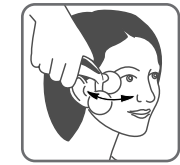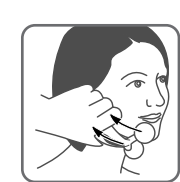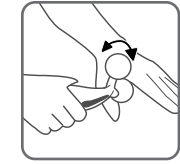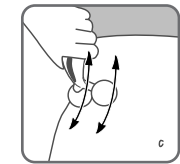

### Проработка талии

Начинайте массажные движения сверху вниз к талии, спускаясь по контуру тела.

### Массаж кистей рук

Поместите массажные ролики между большим и указательным пальцами и вращайте их полукруговыми движениями.

### ЛИЦО И ГОЛОВА

#### Лифтинг подбородка и линии скул

Сосредоточьте прокатывающие движения вокруг подбородка – от центра к уху для формирования четкого V-образного контура лица.

#### Упражнение для щек

Начинайте движение от носа, двигаясь к щеке.

#### Вокруг уголков глаз

Используйте только один ролик, вращайте от уголка глаза к височной области. Прокатывайте его вперед и назад несколько раз.

#### Массаж области лба

Закройте глаза, начинайте движение от бровей и прокатывайте массажер в сторону макушки головы.



### Массаж головы

Используйте только один ролик, начинайте движение от уха к затылочной зоне, от уголка глаза к макушке головы.

### 7. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Всегда храните массажер в чистоте, используйте для этого чехол.
- Протирайте и очищайте прибор только мягкой чуть влажной тканью.
- При необходимости смачивайте ткань в мягком моющем средстве, не допускается использование спирто-содержащих растворов.
- Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель. Это может привести к повреждению устройства. После очистки протрите прибор насухо.
- Обращайтесь с массажером аккуратно. Не роняйте его и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Не допускайте игр детей с прибором. Он должен храниться в недоступном для детей месте.
- Храните массажер вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Утилизация устройства должна осуществляться в соответствии с местными нормативными актами. При обнаружении дефектов обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания продукции CS Medica (адреса центров технического обслуживания указаны в конце данного руководства по эксплуатации).

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. При покупке товара требуйте правильного заполнения гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.

- Гарантия теряет силу в случаях:
  - использования прибора с нарушением требований руководства по эксплуатации;
  - повреждения в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
  - наличия механических или иных повреждений изделия;
  - разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию прибора.
- Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
  - естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы;
  - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

В соответствии со статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» «продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара».

#### \*\*\* Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание \*\*\*

Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание – сервисное обслуживание в течение установленного срока службы изделия, включающее в себя:
 

- проверку изделия на соответствие техническим параметрам;
- восстановление работоспособности изделия без замены деталей (необходимая замена деталей проводится за счет потребителя без взимания платы за проводимые работы, за исключением случаев ремонта по гарантии в течение действия гарантийного срока);
- консультации по использованию и хранению изделия.

	Сроки службы и гарантии	
	Срок гарантии	Срок службы
3D роликовый массажер для тела CS Medica CS-302 BodyLift	18 месяцев	18 месяцев

